

Instructions de préparation

du compresseur pour

un nouveau patient

Location de compresseurs PARI destinés à un usage à domicile



Les instructions suivantes concernent les propriétaires (pharmacies, prestataires de soins à domicile) du compresseur PARI BOY® Pro France. Avant chaque livraison à un nouveau patient, les règles, de maintenance et d'hygiène suivantes doivent être suivies :

Renouvellement des articles à usage unique

- Un nouveau nébuliseur complet avec interface (masque et/ou embout buccal) et tubulure doit être fourni à chaque nouveau patient.
- Le filtre à particules du compresseur doit être changé toutes les 200 heures d'utilisation (environ 1 an).

Contrôles généraux

Contrôlez tous les éléments du produit après chaque retour patient. Remplacez les pièces cassées, déformées ou ayant fortement déteint.

Contrôle des performances

Contrôlez la pression de service à l'aide d'un manomètre agréé et associé à un gicleur de nébuliseur PARI (tel que le contrôleur de pression PARI PG 41) après chaque retour patient. La pression de service normale au moment de la vente initiale par PARI s'élève à 1,6bar +/- 0,2 bar.

Location de compresseurs PARI destinés à un usage à domicile : Instructions de préparation du compresseur pour un nouveau patient

Désinfection du compresseur

En cas de contamination visible, nettoyez le compresseur avant la désinfection.

Le boîtier du compresseur doit être nettoyé en essuyant la surface extérieure avec un chiffon propre et humide.

Puis désinfectez le compresseur en utilisant un désinfectant à base d'alcool disponible dans le commerce (ex. isopropanol). Pour l'utilisation et le dosage du désinfectant, respectez scrupuleusement la notice d'utilisation du désinfectant utilisé.

Ne pulvérisez aucun liquide sur le compresseur ni sur le cordon d'alimentation. Si du liquide a pénétré dans le compresseur, il est interdit de réutiliser celui-ci.

Avant de remettre le compresseur en service, adressez-vous impérativement au fabricant.

Essayez soigneusement les surfaces extérieures du boîtier avec le chiffon.

Contrôle de dotation

Tout composant manquant doit être remplacé.

Documentation

Les notices d'utilisation complètes doivent être délivrées à chaque nouveau patient.

Pour toute question complémentaire, veuillez vous référer à la notice d'utilisation ou contacter l'équipe PARI France au **01.56.83.85.00** ou par mail à l'adresse suivante : **clients-fr@pari.com**.



PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg
GERMANY

PARI France
Z.A. du Petit Nanterre
11 avenue de l'île Saint-Martin
92737 Nanterre Cedex
FRANCE

www.pari.com